

가정용 산소 발생기

1) EverFlo(에버플로), AeroPlus5(에어로플러스5), VisionAire(비전에어)

- 가. 전원잭을 콘센트에 연결한다.
(멀티탭, 멀티콘센트를 사용하면 전원공급이 불안정하여 직접 연결을 권장)
- 나. 전원(O/I) 버튼을 눌러 기기를 작동한다.
- 다. 케놀라와 연장튜브를 결합후 산소 배출구에 연결 한다.
- 라. 물통을 사용시 물통의 뚜껑을 열고 정제수혹은 증류수를 표시 된 미니멈선 까지 채운후 뚜껑을 닫고 물통뚜껑의 튀어나온 부위와 산소배출구를 Kit로 연결후 케놀라를 연결하여 사용한다.
- 마. 병원에서 처방 받은 유량을 유량계에 표시 된 숫자에 검정색 구슬이 위치하게 조정밸브를 돌려서 맞춘다.
- 바. 장비의 후면부에 위치한 먼지필터를 1주일 마다 분리하여 먼지제거후 재사용합니다.

2) Krober4.0 (크래버4.0)

- 가. 전원잭을 콘센트에 연결한다.
(멀티탭, 멀티콘센트를 사용하면 전원공급이 불안정하여 직접 연결을 권장)
- 나. 기기 상단의 전원 버튼(O-I)을 1초 정도 꾹 누른후 손을 떼면 기기가 작동 한다.
- 다. 튜브 및 케놀라를 산소 배출구에 연결 한다.
- 라. 물통 사용시 뚜껑을 열고 정제수혹은 증류수를 표시된 미니멈선 까지 채운후 뚜껑을 닫고 물통 뚜껑의 튀어나온 연결 부위와 산소 배출구를 Kit로 연결 후 케놀라를 연결하여 사용한다.
- 마. 기기상단에 유량조절 버튼을 2초간 꾹 누른 후 액정 화면이 깜빡이면 사용 유량에 맞게 버튼을 돌려서 조절한 후 다시 버튼을 한번 누른후 사용한다.

<보관 및 주의사항>

- 가. 벽에 있는 전원에 연결해야 합니다.연결구가 여러개인 경우의 콘센트는 위험합니다.
- 나. 기기를 눕히지 않고 세워서 보관한다.
- 나. 공기 흡입구와 배출구를 막히지 않게 벽에서 20Cm정도 떨어져서 사용한다.
- 다. 충격이나 물기에 노출 되지 않게 보관한다.
- 라. 일주일에 한번은 깨끗한천이나 청소기로 먼지제거를 한다.
(공기흡입구, 배출구, 필터부분, 기기 외관)